



## Flat Slide Sheet – Gleittuch

Sicheres und einfaches Umlagern von Patienten.

- Mindert den Kraftaufwand der Anwender, um die Patienten einfach und sicher zu bewegen
- Hervorragende Gleitfähigkeit
- Vielseitig und flexibel einsetzbar
- Reissfest
- Latexfrei
- Hygienisches, patientenbezogenes Einwegprodukt
- Röntgenstrahlendurchlässig

Mit dem extrem gleitfähigen Flat Slide Sheet können Patienten schnell, sicher und mit geringem Kraftaufwand umgelagert, bewegt, gedreht und sogar aufgesetzt werden.

## Material

Öko-zertifiziertes, latexfreies und reissfestes Gewebe.

## Anwendungshinweis / Handhabung

Der Patient ist während der Umlagerung mit dem Flat Slide Sheet vor ungewolltem Rutschen zu sichern. Platzieren Sie das Flat Slide Sheet entsprechend dem üblichen klinisch-pflegerischen Umgang unter dem Patienten. Das Flat Slide Sheet ist hierbei einmal in der Mitte zu falten, damit zwischen den aufeinanderliegenden Hälften die Gleitfläche entsteht.

Liegt der Patient auf dem Flat Slide Sheet, kann er mit geringem Kraftaufwand bewegt werden. Das Gleittuch hilft, Scherkräfte bei dem Umlagern von Patienten zu vermeiden.

Nach Gebrauch kann das Gleittuch unter dem Patienten einfach durch Einrollen entfernt werden.

## Reinigung

Hygienisches, patientenbezogenes Einwegprodukt.

## Artikel-Nr.: DFS70200X50SP

Artikelbezeichnung: Flat Slide Sheet, Gleittuch

Masse je Tuch: 70 x 200cm

Inhalt VE: 50 Stück