

MamaSafe®

Pflege & Schutz für stillende Mütter



Produkteigenschaften

Die **MamaSafe® Brustwarzenschutzringe** von HSO unterstützen den **Heilungsprozess von wunden Brustwarzen** – die durch das Stillen verursacht werden.

MamaSafe® schützt die Brustwarzen vor dem Verkleben mit der Kleidung und lässt die Luft ungehindert zirkulieren. Das zusätzliche Eincremen der wunden Brustwarzen mit Wollfett verhindert das Verkrusten. Die so erzielte **Feuchtheilung** ist für die stillenden Mütter wesentlich besser als eine Trockenheilung. Die **Feuchtheilung verhindert die Bildung von Wundschorf**, der bei erneutem Stillen aufbrechen würde.

MamaSafe® Brustwarzenschutzringe **nehmen den Patientinnen die Druck- und Reibungsschmerzen**, hemmen die Keimentwicklung und **fördern eine schnelle Wundheilung**. Das ringförmige Design und die Verwendung von hautfreundlichen Materialien sorgen für einen **angenehmen und sicheren Halt**.

Anwendungshinweis



Platzieren Sie den MamaSafe® Brustwarzenschutzring so auf der Brust, dass sich die **Brustwarze in der Mitte** befindet.



Um **Kreuzkontaminationen zu vermeiden**, verwenden Sie immer denselben MamaSafe®-Ring für dieselbe Brust. Die paarweise verpackten MamaSafe®-Ringe sind dank einem **blauen** und einem **roten Nahtfaden** voneinander zu unterscheiden.



MamaSafe® Ringe können bequem unter dem BH platziert werden und sorgen für eine sichere und schnelle Wundheilung. Die Oberfläche von MamaSafe® ist zu 100 % aus Baumwolle und damit sehr hautfreundlich.



Stillen ist die **effektivste Gesundheitsvorsorge!** MamaSafe® unterstützt eine lange und gesunde Stillzeit.

Herstellerhinweis

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir die MamaSafe®-Ringe täglich oder je nach Verschmutzungsgrad zu wechseln. Eine Wiederaufbereitung der Brustwarzenschutzringe wird nicht empfohlen!



Vertrieb in der Schweiz:

TapMed  AG
Gumprechtstrasse 33 · 6376 Emmetten

Telefon +41 41 520 61 11 · info@tapmed-swiss.ch