

Schnellinfo

Vac-Pac® – Vakuummatte

Zur sicheren Patientenpositionierung
im OP mittels Unterdruck



51631

51608

51611



Das Vac-Pac® ist für eine Vielzahl von Lagerungen besonders gut geeignet z. B.: Trendelenburg, Seitenlagerung, Beachchair-Lagerung oder bei der Lagerung adipöser Patienten. Mittels Unterdruck durch den OP-Sauger kann die Vakuummattreze ideal an die Körperform angepasst werden und bietet eine optimale Druckentlastung bei gleichzeitiger Stabilität der Position des Patienten. Durch eine spezielle Füllung - die verschiedenen grossen Kügelchen sind eine Besonderheit des Vac-Pac® von Natus - ergibt sich nach dem Absaugen eine druckentlastende Oberflächenvergrösserung.

Die Aussenhaut ist hautsympathisch, elastisch und robust zugleich. Spitze Gegenstände sollten nicht in Berührung mit dem Vac-Pac® kommen. Ein Reparaturset liegt jedem Vac-Pac® bei. Vac-Pac®s sind nicht einweisungspflichtig, jedoch empfehlen wir eine Präsentation oder Schulung durch unseren Aussendienst (kostenfrei).

Für die Vac-Pac®s Nr.: 51630, 51631, 51632 und 51640 sind Einmalschutzbezüge separat erhältlich.

Produktmaterial

- Aussenhaut: 20-mil-Polyvinylchlorid-Film (PVC)
- Ventil: Weisses PVC
- Kügelchen im Innern:
Geschäumtes Polystyrol (Styropor),
0,023-0,047 mm

Latexgehalt

Vac-Pac®s sind latexfrei.

Leitfähigkeit

Vac-Pac®s sind nicht leitend.

Röntgenstrahlendurchlässigkeit

Vac-Pac®s sind röntgenstrahlendurchlässig.

Gewährleistung

Einjährige Gewährleistung auf alle Material- und Herstellungsfehler.

Richtlinienklassifikationen

- Vac-Pac®s entsprechen den europäischen Richtlinien für Medizinprodukte der Klasse I.
- Vac-Pac®s tragen das CE-Zeichen. Die Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

Vac-Pac® – Vakuummatte

Desinfektion und Reinigung

Vac-Pac®s sind schnell und einfach mittels Wischdesinfektion zu reinigen. Aufgrund der hohen Anzahl der auf dem Markt existenten Desinfektionsmittel wurde Vac-Pac® nicht auf die Verträglichkeit mit den einzelnen Desinfektionsmitteln getestet, sondern auf die Verträglichkeit mit den in den meisten Desinfektionsmitteln enthaltenen Inhaltsstoffen (Phenolharz, Ammoniak, Alkoholgemische). Somit ist die Verwendung der meisten auf dem Markt erhältlichen Desinfektionsmittel empfehlenswert.

Artikel-Nr.	Produktbezeichnung	Masse in mm	Stückzahl je VE
51608	Patientenpositionierung Vac-Pac® Nr. 8, mit Flügeln	1330 x 860	1 Stück
51611	Patientenpositionierung Vac-Pac® Nr. 11, U-förmig	410 x 300	1 Stück
51623	Patientenpositionierung Vac-Pac® Nr. 23, kleines U, klein	510 x 460	1 Stück
51630	Patientenpositionierung Vac-Pac® Nr. 30, kleines U, mittelgross	900 x 730	1 Stück
51631	Patientenpositionierung Vac-Pac® Nr. 31, kleines U, gross	900 x 980	1 Stück
51632	Patientenpositionierung Vac-Pac® Nr. 32, kleines U, extra gross	900 x 1180	1 Stück
51635	Patientenpositionierung Vac-Pac® Nr. 35, T-förmig mit Laschen	710 x 880	1 Stück
51640	Patientenpositionierung Vac-Pac® Nr. 40, grosses Rechteck	1930 x 760	1 Stück
VPC30	Vac-Pac® 30 Einmalschutzbezüge		30 Stück
VPC31	Vac-Pac® 31 Einmalschutzbezüge		30 Stück
VPC32	Vac-Pac® 32 Einmalschutzbezüge		30 Stück
VPC40	Vac-Pac® 40 Einmalschutzbezüge		15 Stück
516RS	Reparaturset	Set bestehend aus: 1 Reparaturflicken 1 Absaugadapter 1 Ventildeckel	1 Stück
516-100197-01	Vac-Pac®-Adapter		1 Stück
08-5370	PVC-Hand-Vakuum-Pumpe		1 Stück

Die Gebrauchsanweisung des Produktes ist zu beachten.